


iArmS 輸送と開梱

キャスター付キャリングケース
(90x72x150cm・200kg) iArmS合計300kg

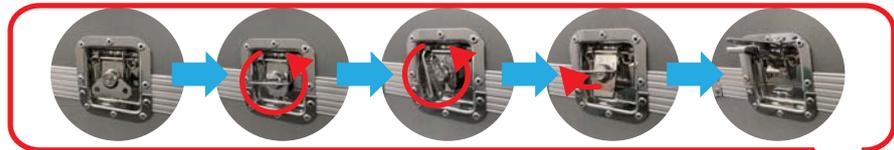

STEP 2 : ロック解除 2箇所

 運搬時の注意




※運搬時
ケースが転倒しないように下記の押し位置に手をかけ、
ゆっくり運んでください。
段差などにつまずき、転倒する恐れがあります



STEP 1 : キャスタの
ブレーキをかける。4箇所

STEP 3 : 上部蓋を上げる

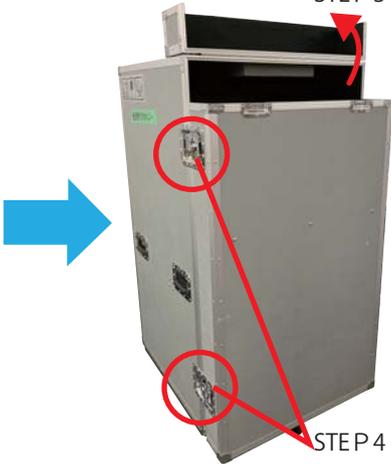


STEP 4 : 下扉のロックを外す
(4箇所)

※扉が開かないように
手で押さえながら




STEP 5 : 下扉を下す
※指はさみ注意

※扉が開かないように
手で押さえながら

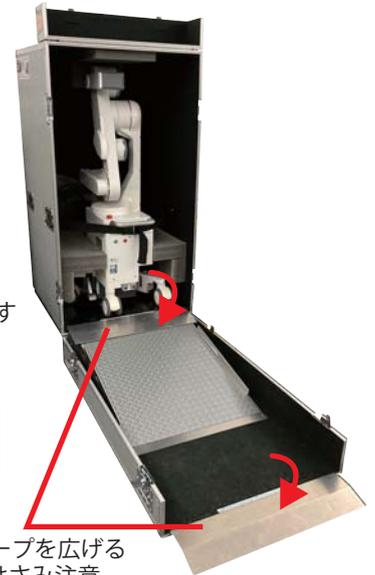


STEP 6 : スロープを広げる
(2箇所) ※指はさみ注意

STEP 7 :
ベルトのバックルを外す

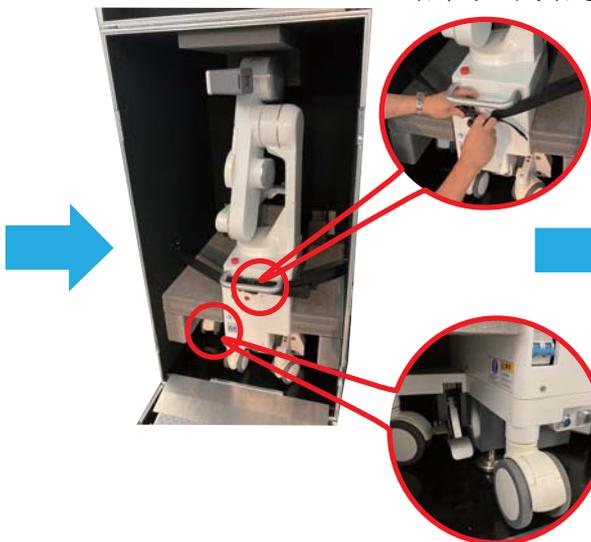

STEP 8 :
iArmS のブレーキを外す

STEP 9 :
iArmS の持ち手を引っ張り
ゆっくり下します

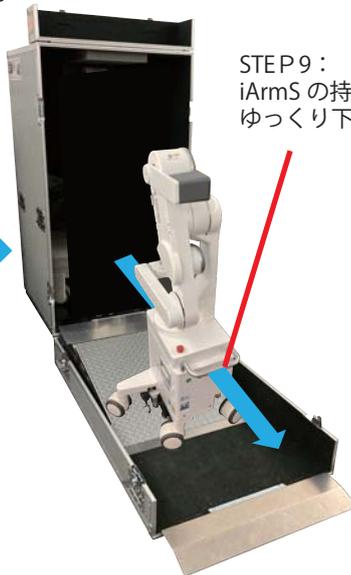

STEP 10 :
iArmS を起動してアームを
動かしてから保護スポンジを外す