

1. パッケージ



- セット内容
- ・ドレープ
 - ・ゴムバンド（2個）



「手のひら」マークはドレーピングの際、手をドレープのどこに入れてドレープをアームにかけるかを示します

ドレーピングが終わってからドレープがアームにかかった状態では意味を成しません。

2. ドレーピング手順

手を入れるところはドレープの外側に当たります。

ドレープの外側を持って、ドレープをアームに覆う作業です。

原則として、ドレーピング作業は清潔な作業になりますので、術者又は清潔の看護師やスタッフが行います。（実際の手術の時）

手順1 ドレープを横方向へ展開



ドレープの手のひらシールを上にしたがしながら横方向へ展開する

手順2 ドレープを縦方向へ展開



写真のように、上下向高に展開する

手順3 手のひらシール確認（右）



右側の手のひらシールの位置を確認し、右手を差し込む

手順4 手のひらシール確認（左）



左側の手のひらシールの位置を確認し、左手を差し込む

手順5 手を差し込む



両手を差し込んだ状態で iArmS にかぶせる